




インピーダンスオージオメータ RS-41

チンパノメトリーに特化した
小型・省スペースの
インピーダンスオージオメータ

RS-41

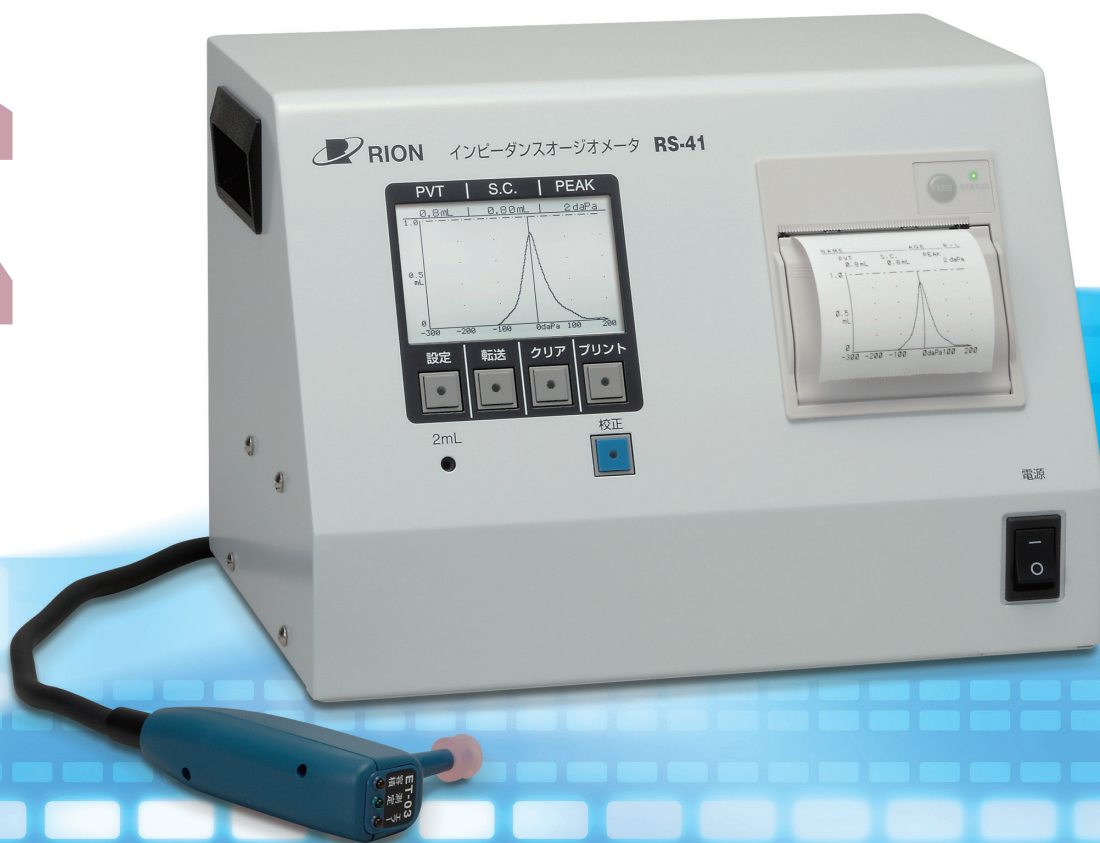

外耳道にプローブを
押し当てるだけの
自動スタート機能搭載

1検耳 約6秒で
迅速測定

診察台でも
場所をとらない
B5サイズ
(W260×D190×H190mm)

インピーダンスオージオメータ RS-41

仕様

販売名:インピーダンスオージオメータ RS-41
 類別:機械器具23 聴力検査用器具
 一般の名称:インピーダンスオージオメータ
 JMDNコード:36717010
 医療機器分類:管理医療機器 クラスII
 特定保守管理医療機器:非該当
 修理区分:非特定保守管理医療機器/第2区分
 適用規格:JIS T0601-1:2014, JIS T0601-1-2:2018, JIS T 14971:2012, IEC60645-5Ed.1.0:2004

検査機能

検査項目:チンパノメトリー
 プローブ音:周波数226Hz 音圧 85dB ひずみ率 3.0%未満
 (プローブ音はIEC60318-5による)
 等価容積:測定範囲 0.3mL以上5.0mL未満
 圧力範囲:+200~-300daPa
 圧力変化速度:200daPa/s
 結果表示:チンパノグラム
 測定開始時の等価外耳道容積(PVT)
 スタティックコンプライアンスの最大値(S.C.)
 S.C.の圧力値(Peak)
 各種エラー表示

デジタル部

表示器:3.2インチ 液晶表示器
 プリンタ:感熱式プリンタ 記録紙TP-41
 インタフェース:RS-232-C

電源

電撃に対する保護の形式による分類:クラスI機器
 電撃に対する保護の程度による装着部の分類:B形装着部
 電源:AC100V 50/60Hz 30VA

環境条件

動作温湿度範囲:15~35℃ 30~90%R.H.(いずれも結露なきこと)
 動作気圧範囲:700~1020hPa(海拔高度3000m以下)
 輸送および保管時の条件:温度-10~50℃ 湿度10~90%R.H.(いずれも結露なきこと)
 気圧500~1050hPa

大きさ・重さ

本体 寸法:約260(幅)×190(奥行)×190(高さ)mm
 質量:約3.7kg
 プローブ 寸法:約70(長さ)×25(幅)×95(縦)mm
 ケーブル長:約2m
 質量:約200g

付属品

イヤープローブ	ET-03	1
耳せん φ7~14 8種		各2
耳せん A~C 3種		各2
耳せん 小 φ6~9 4種		各2
アース付き3P電源コード	AA-38-222	1
ヒューズ	0218002.MXP	2
感熱記録紙	TP-41	2
クリーニングワイヤ	RS-31-017	1
掃除棒	RS-31-018	1
プローブホルダ	RS-41-005	1
耳せん用ケース	PV-97-S05	1

※本仕様は改良のためお断りなく変更することがあります。

医療機器認証番号 222AABZX00181000



本社・営業部 〒185-8533 東京都国分寺市東元町3-20-41
 TEL:042-359-7880 FAX:042-359-7441

東京営業所 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-5-5(新宿農協会館)
 TEL:03-6276-1433 FAX:03-6276-1425

仙台営業所 〒982-0015 仙台市太白区南大野田25-13
 TEL:022-249-5533 FAX:022-249-5535

西日本営業所 〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-5(横山ビル)
 TEL:06-6363-4133 FAX:06-4797-0111

東日本リオン(株) 〒330-0062 さいたま市浦和区仲町3-11-2
 TEL:048-824-1205 FAX:048-824-8885

東海リオン(株) 〒460-0004 名古屋市中区新栄町2-9(スカイオアシス栄ビル)
 TEL:052-954-1733 FAX:052-954-1734


九州リオン(株) 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町5-18
 TEL:092-281-5361 FAX:092-291-2847

本紙は、環境に配慮した植物油インキを使用しています。

- 外耳道容積、スタティックコンプライアンス、ピーク圧を自動測定。測定後に自動で印刷・データ転送の設定も可能なため、スクリーニングに最適です。
- 1検耳、約6秒と短時間で検査できます。
- データ転送機能を搭載。電子カルテに対応できます。

画面例

ピークに合わせてグラフスケールが変化するオートレンジ機能搭載。等価外耳道容積1.0mLに目安のマーカーが入ります。

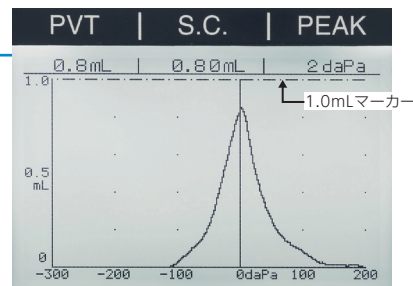

プローブホルダ


プローブホルダは本体の左右どちらにでも取り付けられます。



印字例

印刷サイズは2種類から選択できます。

Small
 約50(縦)×57(横)mm
 Large
 約57(縦)×80(横)mm

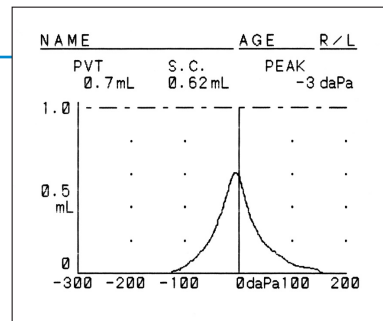

www.rion.co.jp

お問い合わせ・ご相談は・・・

202201 CX