

## 医療機器の保守・点検記録表

品名／形式	オージオメータ / AA-		
製造販売業者	リオン株式会社		
製造番号		購入年月日	
施設名		保管場所	

種類	点検内容	点検年月日	点検者	結果
使用前点検	<p>1. 外観（構造）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・耳あてゴムの状態、プラグのさび、接触不良、コードのねじれがないこと。</li> <li>・ヘッドバンドの確認 破損、緩み、バネの劣化がないこと。</li> </ul> <p>2. 機能（性能）</p> <p>電源投入後、受話器（気導・骨導）を装着して、全周波数の聴取点検を実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・聴力レベルダイヤルを変化させて、音の大きさが変化すること。また、音が歪んでいないこと。</li> <li>・インタラプタを操作したとき、過渡音その他好ましくない音が聞こえないこと。</li> <li>・応答用押しボタンスイッチの動作に合わせて、機器パネル／画面上の表示が正常であること。</li> </ul>			良 ・ 否
				良 ・ 否
				良 ・ 否
				良 ・ 否
				良 ・ 否
				良 ・ 否
				良 ・ 否
				良 ・ 否
				良 ・ 否
				良 ・ 否
				良 ・ 否
				良 ・ 否
				良 ・ 否
点検・校正	年に一度、専門業者に点検校正を依頼する。			良 ・ 否

修理	修理の概要・修理業者名など	修理年月日	確認者	その他
----	---------------	-------	-----	-----