

医療機器の保守・点検記録表

医療機器販売名	聴覚スクリーナー audioscreener 2		
製造販売業者	リオン株式会社		
製造番号		購入年月日	
施設名		保管場所	

種類	点検内容	点検年月日	点検者	結果
使用前点検	<p>1. 外観 (構造)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本体や付属品に構造上の破損、コード類のねじれなどがないこと。 <p>: 注意 : イヤークップ、スナップ電極、耳せんは、繰り返し使用できません。単回使用です。</p> <p>2. 機能 (性能)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本体の電源を投入したとき、画面が正常に表示されること。 <p>: 注意 : 推奨校正期限を過ぎると電源投入時にメッセージが出ます。検査は行えますが、速やかに点検校正を行ってください。</p> <p>【自動 ABR】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・パステッカーを用いて検査を行ったとき、結果が“Pass”になること。 <p>【DPOAE/TEOAE】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・イヤースミュレータを用いて検査を行ったとき、結果が“Refer”になること。 			良 ・ 否
				良 ・ 否
				良 ・ 否
				良 ・ 否
				良 ・ 否
				良 ・ 否
				良 ・ 否
				良 ・ 否
				良 ・ 否
				良 ・ 否
				良 ・ 否
				良 ・ 否
				良 ・ 否
点検・校正	年に一度、専門業者に点検校正を依頼する。			良 ・ 否

修理	修理の概要・修理業者名など	修理年月日	確認者	その他
----	---------------	-------	-----	-----